

Connected to

... сбор семени

NEW

MaxCollect

Конус для сбора семени Collectis.

Производить больше доз легко



MaxCollect

Эффективно

Собирайте на 10% больше доз MaxCollect.

Не надо больше перерасходовать семя

- Оптимизация системы фильтрации:
 - Больше 400 отверстий
 - Не закупоривается (тапиока, семя)
- Высокая скорость фильтрации: фильтрация занимает несколько секунд.

Эффект конусов на теоретическое число доз.

Количество хряков	Среднее
контроль (№ = 378)	39.4 ± 12.6
новый конус(№ = 287)	43.2 ± 12.9
Р-значение	0.0018

№- количество эякулятов

+3,8
DOSES

Быстрая фильтрация объемных эякулятов

эякуляты большого объема быстрее фильтруются, не блокируя поток семени через конус, благодаря:

- Больше площадь фильтрации
- Новая форма конуса с увеличенной фильтрацией
- Нет риска обструкции от геля


Протокол: тест, проведенный с Collectis на 92 хряках во Франции (возраст: от 7 месяцев до 4 лет).



Приоритет по качеству

В синергии с Collectis: бактериальная загрязненность снижается до 10 раз

Бактериальная контаминация на мл (CFU: colony-forming units)

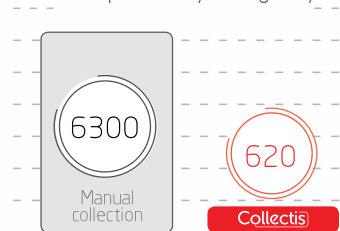

Сравнение между ручным сбором и Collectis

Исследование проводилось на хрячнике со средним возрастом два года. 50% были собраны вручную, а 50% были собраны с помощью Collectis.

С MaxCollect, снижение бактериальной контаминации такое же.

Улучшенные условия труда

MaxCollect тверже благодаря новому дизайну и материалу. Это облегчает подключение конуса к искусственной вагине.

Облегченный визуальный контроль

Благодаря лучшему прослеживанию сбора теперь легче проверять наличие примесей или крови в эякуляте



Новая форма для упрощения сбора